



FACE SHIELD KOTA

PROTETOR FACIAL



CONTEÚDO

1 arco e 1 viseira.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Arco – Plástico thermo rubber e viseira – PETG.

INDICAÇÃO DE USO

Os protetores faciais são dispositivos de proteção indicados para proteger a área de risco (rosto do usuário) contra as gotículas (olhos, nariz e boca) e evitar contato das mãos do usuário com o rosto, durante a realização de procedimentos médicos e odontológicos. Possui as seguintes características:

- Macio, confortável e com elástico, com design discreto e leve.
- Transparente, possui alto poder ótico, além de boa resistência a riscos.
- Proporciona uma ótima visualização fácil, não dificulta a fala nem o campo de atuação.
- Material Soft Touch super flexível e com memória, pode ser totalmente dobrado.
- Viseira em lâmina de 0,5 mm.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

O produto deve ser armazenado em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. Para conservar sua qualidade, o produto deve ser mantido em sua embalagem original quando não estiver em uso.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Utilizar o protetor facial em conjunto com a máscara de proteção respiratória para potencializar a proteção contra vírus e bactérias. Realizar a correta limpeza e assepsia do produto antes de utilizá-lo. Sempre realizar a limpeza e desinfecção após o uso, antes de

armazenar o produto. Produto de uso pessoal e intransferível. O produto deve ser utilizado durante todo o período de exposição, para diminuir o risco. O uso inadequado pode resultar em contaminação. Este produto reduz a exposição aos agentes contaminantes, porém não elimina o risco de contaminação se todas as medidas de prevenção não forem estritamente seguidas.

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

1. Retire a película protetora da viseira transparente dos dois lados.
2. Encaixe os furos da parte de cima do filme transparente nos pinos da testeira até fixá-las.
3. Regule o elástico na parte de trás da testeira até que fique firme e confortável na cabeça. Se preferir, corte o excesso de elástico.
4. Coloque primeiro a parte do elástico atrás da cabeça e puxe até encaixar na testa.

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E ASSEPSIA

Lave em água corrente com sabão neutro e esponja não abrasiva ou utilize um pano limpo com álcool 70% para higienizar bem. Uma boa manutenção aumentará a durabilidade do produto.

VALIDADE: INDETERMINADO.

LOTE: VIDE EMBALAGEM DO PRODUTO.

Fabricado por:

MGR INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS DE USO PESSOAL – EIRELI

CNPJ: 12.995.175/0001-65

Rua Belém, 284 – Jardim Santa Marta

06.529-190 – Santana de Parnaíba / SP

KOTA
desde 1992

Distribuído por: KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 68.174.788/0001-96 | Rua Inácio Cervantes, 1019 – Parque Ipê – São Paulo – SP, Brasil – CEP 05572-000

R.T. Dra. Glaucia Kazumi Kobo Tamake – CRO SP nº 17508 | SAC: +55 11 4615-9200 – sac@kotaimp.com.br

AFE nº 1.03.705-4 | **Produto temporariamente dispensado de Notificação ANVISA conforme RDC nº 379:2020**