

PROVI-GLOSS

Instruções de uso - Pasta Provi-Gloss

A pasta PROVI-GLOSS é indicada para polimento e brilho em próteses provisórias, aparelhos ortodônticos e pequenos desgastes executados em provisórios.

Consiste em um produto de uso odontológico profissional. Indicado para acabamento e polimento de provisórios, proporcionando acabamento e brilho.

Contéudo: 01 seringa de PROVI-GLOSS contendo 2g.

PRODUTO DE USO ÚNICO

Composição: Quartzo Micronizado, Carbonato de Cálcio Fino, Pedra Pomes, Vaselina Sólida, Etileno Glicol e Ultrapeg.

INDICAÇÕES DE USO:

A pasta PROVI-GLOSS é indicada para polimento e brilho em próteses provisórias, aparelhos ortodônticos e pequenos desgastes.

INSTRUÇÕES DE USO:

Dispersar uma pequena quantidade do produto sobre uma roda de feltro já montada no micromotor. Trabalhar em baixa rotação, efetuando leves movimentos sobre a superfície do material restaurador. Prosseguir até alcançar o brilho natural na peça.

O procedimento de polimento do dente provisório ou outro material restaurado deve ser realizado extrabucalmente. Após a realização desse procedimento, deve-se lavar a peça de modo a retirar os resíduos do produto.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Conservar os produtos em local seco e arejado.

Conservar ao abrigo da luz e do calor.

Manter os produtos em suas embalagens originais.

Manter o produto fora do alcance de crianças.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Não manipular em alta rotação.

O feltro deve ser adequadamente descartado após o uso.

Recomenda-se que o uso seja restrito aos profissionais da área de odontologia.

Não utilizar se a embalagem estiver violada.

O produto deve ser utilizado até a data de validade descrita na embalagem.

Realizar o polimento do dente provisório extrabucalmente. Após a finalização do procedimento de polimento, lavar a peça de modo a eliminar eventuais resíduos do produto.

CONTRAINDICAÇÕES:

O produto não apresenta restrições de uso e contraindicações, desde que seja utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo suas instruções de uso.

VALIDADE DO PRODUTO: 24 meses após a data de fabricação.

KOTA

Fabricado por:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Parque Ipê | São Paulo - SP, Brasil | CEP 05572-000

INDÚSTRIA BRASILEIRA

R.T.: Dra. Gláucia K. K. Tamake - CRO/SP 17508 - **NOTIFICAÇÃO ANVISA N.º: 10370540080**

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Vide Instruções de Uso ou acesse: kotaimp.com.br

 /kotagrupo  @kotaimp  kotaimp.com.br