

KOTA
desde 1992

MESA VIBRATORIA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUCCIONES MESA VIBRATORIA


ESTIMADO USUARIO:

Gracias por escoger un producto **KOTA**.

Los equipos KOTA son producidos con materiales de calidad buscando garantizar la confiabilidad y la seguridad de sus productos.

Para mantener el perfecto funcionamiento de su **Mesa Vibratoria Kota**, son necesarios algunos cuidados básicos. Lea atentamente este manual y siga las orientaciones de instalación y uso.

IMPORTANTE:
**LA MESA VIBRATORIA KOTA ES UN EQUIPO DESTINADO
A LOS LABORATORIOS DE PRÓTESIS DENTAL.**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	
	<ul style="list-style-type: none">• Utilice productos originales KOTA identificados por la marca, que le garanticen desempeño a su equipo;
	<ul style="list-style-type: none">• No modifique el equipo ni le solicite a terceros que lo haga, a no ser cuando sea autorizado específicamente por KOTA, pues el desempeño y/o la seguridad podrán ser comprometidos. Cualquier modificación sin previa autorización implicará en la pérdida de la garantía;
	<ul style="list-style-type: none">• Debe ser utilizado por personas que conozcan la técnica de operación correspondiente;
	<ul style="list-style-type: none">• Este equipo está conectado en una tensión de alimentación de 220V/127V;
	<ul style="list-style-type: none">• No mojar el equipo;
	<ul style="list-style-type: none">• Siempre utilizar la tierra junto a la alimentación eléctrica;
	<ul style="list-style-type: none">• Límites para funcionamiento constante del equipo: Tiempo de trabajo continuo: 60 minutos Tiempo de descanso: 10 minutos

ADVERTENCIA

KOTA presenta este Manual con el objetivo de facilitar el uso y mantenimiento de la **MESA VIBRATORIA KOTA**.

Nuestra empresa no se responsabiliza por daños o modificaciones ocurridas por la mala utilización del equipo.

Todos los equipos poseen una copia del Manual de Uso y Mantenimiento. Las instrucciones que aparecen en él deberán ser observadas atentamente para la garantía de un perfecto funcionamiento.

El incumplimiento de las instrucciones del Manual de Uso y Mantenimiento determina la cancelación inmediata de la garantía.

Para cualquier tipo de reclamación, indicar el tipo de equipo, modelo y número de serie (seguir las instrucciones del Término de Garantía).

INTRODUCCIÓN

El presente Manual corresponde al equipo **MESA VIBRATORIA KOTA**.

Cuando desempaquete el equipo, verifique si existe algún daño proveniente del transporte. En el caso que esto ocurra, entre en contacto con Kota o con su revendedor, lo más rápido posible.

Siga atentamente las instrucciones para la perfecta instalación de la **MESA VIBRATORIA KOTA**.

ÍNDICE

- 1 – Vibrador**
- 2 – Cable de alimentación**
- 3 – Término de Garantía**
- 4 – Manual de uso de mantenimiento**

DESCRIPCIÓN

La **MESA VIBRATORIA** es el resultado de la gran cooperación de modernos laboratorios de prótesis en el estudio minucioso de la innovación tecnológica producida en el campo electrónico, teniendo como resultado un equipo de referencia dispuesto a solucionar las necesidades de los laboratorios en lo que se refiere a la prevención de la formación de burbujas.

Los modelos de referencia difieren solamente en el área de vibración. Este equipo crea oscilaciones verticales, en el área de trabajo, que puede ser desmontada.

En la parte del frente se encuentra el interruptor enciende / apaga y la regulación de la frecuencia de oscilaciones.

INSTALACIÓN

Es importante verificar la integridad del equipo y el estado del embalaje. Se recomienda guardar el embalaje original para que, si es necesario, utilizarlo en el envío del equipo para revisión.

Colocar el equipo sobre la mesa de trabajo y posteriormente efectuar las conexiones.

Conecte el cable de alimentación del aspirador al enchufe de 220V/127V.

No posicionar el equipo para dificultar la operación de desconexión del cable de la red de alimentación.

Condiciones ambientales de uso:

Temperatura: 5oC a 40oC

Humedad: 30% a 95%

Presión: 500 hPa a 1060 hPa

USO Y MANTENIMIENTO

Método de uso:

- Encender el equipo
- Escoger el nivel de vibración

Recomendaciones:

- Mantener el equipo limpio, libre de polvo
- Limpiar periódicamente el plan de trabajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación: 220V/127V

Frecuencia: 50Hz

Potencia: 110W

Fusible: 0,5Amp. (Medidas: diámetro 5 x 20 mm)

Niveles de vibración: Bajo, Mediano, Alto

Dimensiones externas del equipo



Altura: 100 mm

Ancho: 300 mm

Profundidad: 185 mm

Peso: 5 kg

Todas las vibraciones son contenidas en el vibrador y no se distribuyen para las áreas adyacentes. Ambos modelos cuentan con un soporte de acero (arco), para apoyar la cubeta y realizar el vertido correspondiente, dando como resultado un modelo mejor compactado y sin burbujas interiores.

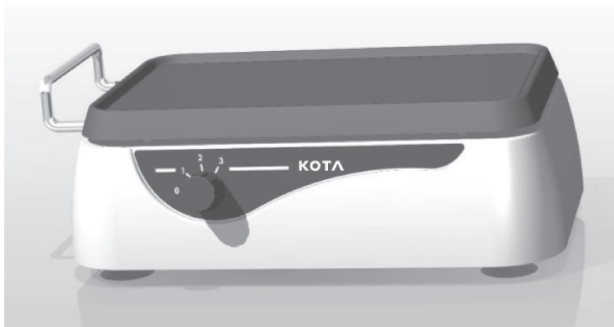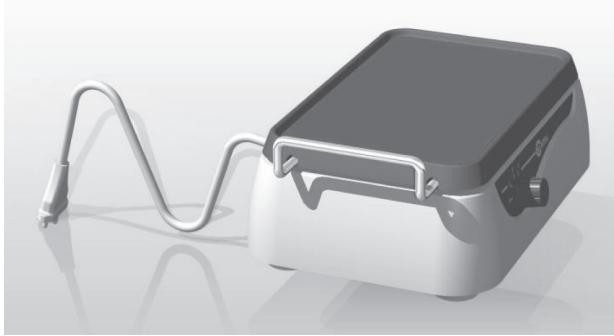

GARANTIA

KOTA Equipos garantiza el producto y sus accesorios contra defectos de material y mano de obra, siempre que sean operados de acuerdo con las condiciones de uso especificadas en el Manual del Usuario.

El plazo de esta garantía es de un año contado por 12 (doce) meses a partir de la fecha en que el equipo fue adquirido, siendo 3 (tres) meses de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual.

Para reparar un equipo dentro de la garantía, entre en contacto con KOTA Equipos acompañado de esta garantía y de la respectiva factura fiscal de compra o del número de serie del producto.

Las piezas, accesorios o placas sustituidas serán garantizadas por el tiempo restante de la garantía original o por el plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de entrega del aparato reparado al consumidor, prevaleciendo lo que ocurra por último. Todas las piezas, accesorios, placas o equipos sustituidos en garantía serán propiedad de KOTA Equipos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

KOTA Equipos no será, en ninguna hipótesis, responsable por ningún equipo que no sea de su suministro, así como no será responsable del mal funcionamiento o por los accesorios usados con piezas que no sean originales de KOTA Equipos.

ÍTEMS EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre:

- Defectos o daños resultantes del uso del producto de otro modo que no sea el especificado en el Manual del Usuario;
- Defectos por daños derivados de prueba, instalación, transformación o cualquier tipo de modificación realizada por personas o asistencias técnicas no autorizadas por KOTA Equipos;
- Desgastes de las ruedas, arañazos o daños en el asiento y espaldar de madera debido al mal uso del producto.

Ocurrirá la pérdida automática de la garantía en el caso de la no utilización de la asistencia técnica autorizada KOTA durante la vigencia de la garantía.

KOTA EQUIPOS

kotaimp.com.br
Rua Íris Memberg, 140
Vila Jovina - Cotia, SP | CEP 06705 150
55 11 4615 9200

CONSULTOR TÉCNICO

consultoria.lab@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 4798 5458

SAC

sac@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763



KOTA
desde 1992